

MODE D'EMPLOI POUR LA MISE EN PLACE DU GARROT SOF® TOURNIQUET



Glissez par-dessus le membre,
au-dessus de la blessure



Tirez fermement sur
l'extrémité



Tournez la poignée jusqu'à ce
que le saignement s'arrête



En option : fixez le clip de
manière temporaire



Bloquez et sécurisez en
triangle



Notez l'heure



NSN : 6515-01-696-4522

Pièce # 84-0009

Brevet US : 8,303,620 et D649, 642 et 7,776,064

ATTENTION : DISPOSITIF À USAGE UNIQUE




Equipements des Métiers de la Défense

Mettre le garrot en place si vous ne pouvez pas le glisser par-dessus le membre : Suivez les étapes 1b-4b



Boucle de sécurité

Tournez pour déconnecter

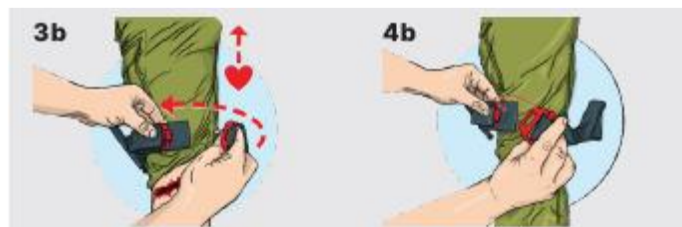

Faites le tour du membre

**Connectez la boucle, puis
allez à l'étape 2**

STOCKAGE DU GARROT SOF® TOURNIQUET

Stockez le garrot avec la boucle connectée et suffisamment de mou pour glisser la boucle du garrot par-dessus votre membre.

Tél. +33 (0)2 97 05 53 74 | Fax. +33 (0)2 97 05 53 60 | contact@emd-pro.com | www.emd-pro.com

11 rue du Commandant Charcot - Parc d'Activités de Kerhoas - 56260 Larmor-Plage - France

SARL - Capital : 108 000 euros - SIRET : 532 054 251 00014 - RCS LORIENT 532 054 251 - Code NAF (APE) : 4669C