



# Manuel d'utilisation

## Collier Cervical Modulable NECKLITE


Réf. 329100 - 329101

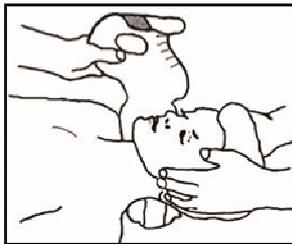

1. Glisser l'arrière du collier (partie avec le trou elliptique) sous le cou de la victime jusqu'à ce que l'extrémité avec la bande velcro soit accessible du côté opposé de la tête de la victime.

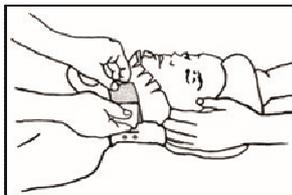

2. Envelopper la partie frontale sous la mâchoire inférieure de la victime, en alignant l'ouverture trachéale et le menton. Sécuriser le collier autour du cou de la victime grâce à la bande velcro. Le collier doit reposer sur les épaules de la victime et contre le sternum sans qu'il n'y ait de jour visible.

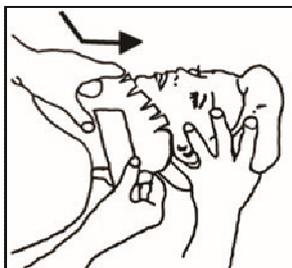

3. Pousser méticuleusement les ailettes contre le menton de la victime afin de positionner le collier correctement et qu'il puisse soutenir le menton. Ajuster le collier dans la position qui immobilisera le cou de la victime, et réajuster la sangle velcro si besoin.



**Dumont Sécurité**

9 rue Lucien Rosengart - 01506 Ambérieu-en-Bugey

Tél : 04 74 46 13 11 / Fax : 04 74 38 35 22

[www.dumont-securite.fr](http://www.dumont-securite.fr) / [info@dumont-securite.fr](mailto:info@dumont-securite.fr)