

## **RESERVOIR D'OXYGENE 2500 ml**

**REF** 248033 HS-60001

**LOT**



Fabriqué par :  
HSINER Co., LTD.  
312, Zhongshang Rd., Shengang Dist.,  
Taichung City 429, Taiwan

**EC REP**

Représenté en Europe par :  
Hsiner EU Rep  
mdi Europa GmbH  
Langenhagener Str. 71  
D-30855 Langenhagen  
Germany  
Tel: +49 511 39089530  
Email: info@mdi-europa.com

Importé en France par :  
DUMONT SECURITE  
9 rue Lucien Rosengart  
01506 Ambérieu-en-Bugey  
Tél : 04 74 46 13 00  
Fax : 04 74 38 35 22

Le réservoir d'oxygène 2500 ml est compatible avec les insufflateurs réutilisables adulte (ballon 1500 ml) et enfant (ballon 550 ml).

Matériau : PVC (sans latex).



### **Attention :**

- 1- Ne pas utiliser si l'emballage a été ouvert.
- 2- Vérifier l'état et le bon fonctionnement du réservoir avant de l'utiliser.  
En cas d'imperfection ou de mauvais fonctionnement, ne pas utiliser pour éviter toute blessure.
- 3- Produit à usage unique. Jeter après usage.

### **Instructions d'utilisation :**

Ce réservoir d'oxygène doit être utilisé par une personne habilitée et formée.

- 1- Sortir le réservoir d'oxygène de son emballage.
- 2- Brancher le réservoir à la valve réservoir. Vérifier les connexions.
- 3- S'il y a un problème avec le réservoir, le remplacer immédiatement.