

江苏蔚百世医疗器械有限公司

JIANGSUWEBEST MEDICAL PRODUCT CO.,LTD


ADD: YINGCHUN RD , INDUSTRIAL PARK, XUYI ,JIANGSU,CHINA

NOTICE

Perfuseur pour l'administration par gravité de préparations injectables

- 1/ Fermer la tubulure à l'aide de la roulette du régulateur de débit
- 2/ Perforer la poche à l'aide du perceur
- 3/ Presser la chambre compte-gouttes pour la remplir et amorcer la perfusion
- 4/ Ouvrir la roulette du régulateur de débit et purger la tubulure
- 5/ Fermer la roulette du régulateur de débit
- 6/ Connecter la perfusion
- 7/ Régler le débit de perfusion à l'aide de la roulette du régulateur de débit

Date: 09/12/2020

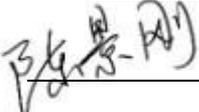

Signature:

Jinggang Chen

Manager of Technical Department

JIANGSUWEBEST MEDICAL PRODUCT CO.,LTD

