




KIM, KEVIN, ET KYLE
Conseils d'Utilisation

Schéma 1

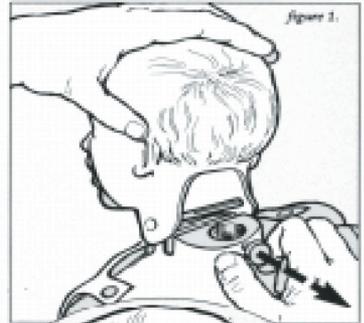

Ce mode d'emploi est destiné à familiariser l'utilisateur avec les fonctions, l'entretien et la maintenance des mannequins d'entraînement Simulaid's Kyle, Kevin et Kim. Il n'est en aucun cas destiné à fournir des instructions en réanimation cardiopulmonaire (Premiers secours) ou toute autre procédure d'urgence médicale. Veuillez le lire attentivement avant de tenter d'utiliser votre mannequin.



Schéma 2

RETRAIT DES VOIES RESPIRATOIRES

1. Détacher le module de torse du mannequin.
2. Tirer sur l'attache de fixation située à la base du cou (Schéma 1) et retirer la tête du corps.
3. Retirer l'ensemble nasotrachéal de la tête.
4. Placer une main dans la tête et saisir la valve à sens unique. Avec l'autre main, tordre et tirer la valve à bride de l'ouverture oropharynx du visage (Schéma 2).
5. Retirer et éliminer l'assemblage voies respiratoires/poumons et la valve à bride.

Valve de anti-réinhalation

Tubulure

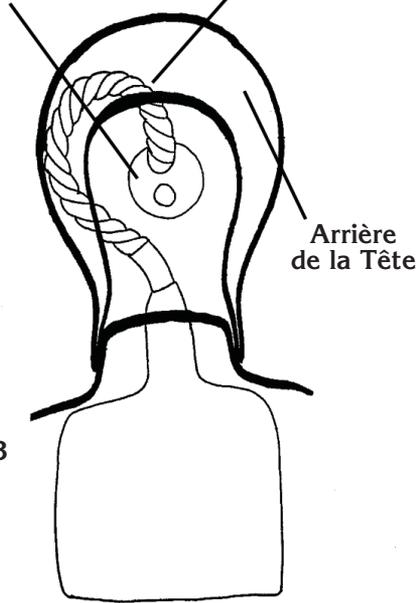


Schéma 3

INSTALLATION DES VOIES RESPIRATOIRES

1. Insérer une valve anti-réinhalation à travers le dos de la cavité faciale et appuyer la valve à bride sur le système anti-réinhalation. Replacer l'ensemble buccal.
2. Faire passer la tubulure à l'intérieur de la tête pour installer les voies respiratoires de Kim et de Kevin (Schéma 3).
3. Faire passer le poumon par-dessus la goupille de tête. Tirer la goupille d'arrêt vers l'arrière et attacher la tête au corps.
4. Maintenir la tête légèrement penchée en arrière, poser le poumon à plat contre le torse et réenclencher le module.

NETTOYAGE ET DESINFECTION

Seuls les composants suivants nécessitent une désinfection scrupuleuse les ensembles bouche-nez.

Nous recommandons les procédures suivantes:

1. Nettoyez à l'eau savonneuse.
2. Rincer abondamment à l'eau claire.
3. Désinfecter en respectant les protocoles CDC (Center for Disease Control).

POIDS ET DIMENSIONS D'EXPEDITION

Kyle — 9 lbs. (4 kg) — 34" x 11" x 7" (86 cm x 28 cm x 18 cm)

Kevin — 5 lbs. (2.25 kg) — 26" x 8" x 8" (66 cm x 20 cm x 20 cm)

Kim — 4 lbs. (1.8 kg) — 26" x 8" x 8" (66 cm x 20 cm x 20 cm)

PIECES DE REMPLACEMENT

Description des pièces:

2955 Kyle Airway System paq./24

2905 Kim, Kevin Airway System paq./24

2082 Kyle bouche/nez Paq./10

2162 Kevin bouche/nez Paq./10

2068 Kim bouche/nez Paq./10

2083 Kyle Africain/Américain bouche/nez Paq./10

2162B Kevin Africain/Américain bouche/nez Paq./10

2069 Kim Africaine/Américaine bouche/nez Paq./10

2252 Sac de transport Kevin/Kim

2260 Sac de transport Kyle

GARANTIE

Vos mannequins Kyle, Kevin et Kim sont garantis contre les défauts mécaniques et de main d'œuvre durant un an à compter de la date d'achat.

CONDITIONS DE RETOUR

S'il s'avère nécessaire de renvoyer un produit pour quelque raison que ce soit, veuillez contacter notre Service Clients pour obtenir un NUMERO RGA (Return Goods Authorization). La marchandise ne pourra être acceptée sans autorisation de retour préalable. Merci de préciser votre numéro de facture lors de votre appel concernant un retour de marchandise. Pour toute question ou renseignement supplémentaire concernant l'un des produits fabriqués ou distribués par nous, veuillez contacter notre Service Clientèle par courrier ou par téléphone au: 800-431-4310.

SIMULAIDS

P.O. Box 1289, 16 Simulaids Drive,

Saugerties, NY 12477 U.S.A.

Numéro sans frais: 800-431-4310 Fax: 845-679-8996

www.simulaids.com

NP 041-06-French Printed in USA