

NOTICE D'UTILISATION TABLETTE PORTE-INSTRUMENTS REF. 520040 et 520440



Vue de dos




Vue de dessus




La tablette porte instrument réf. 520040 est livrée avec les crochets de fixation pour brancard F2 déjà montés.
Un autre jeu de crochet pour brancard Monobloc est livré en plus.

1 - Déplier les pieds de la tablette.
Les crochets pour le brancard F2 sont montés de série.



 WARNING	
Une mauvaise installation et utilisation peut causer des dommages. Installer et utiliser la tablette seulement tel que décrit dans ce manuel.	
Un mauvais entretien peut causer des dommages.	
Modifier le support peut causer des blessures et des dommages. Le support doit uniquement être utilisé tel que conçu.	
Installer des éléments non conçus pour le support peut causer des blessures.	

2 - Installer la tablette sur les longerons du brancard côté pieds.

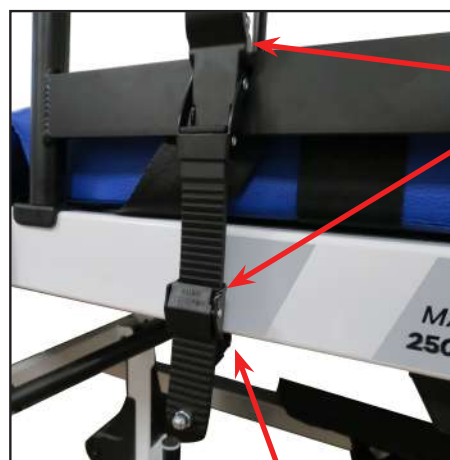

3 - Ajuster la sangle de serrage et verrouiller les fixations.



Fixer le crochet pour brancard F2 (réf. 520040)



Fixer le crochet pour brancard monobloc M / F2M (réf.520440)