

NOTICE CHAISE S242 POUR PORTAGE AVEC BRETELLE

Préambule :

Vous venez d'acquérir une chaise S242 avec anneaux de portage réf. 503012. Pour l'utilisation de la chaise avec les bretelles de portage vous devez compléter votre équipement avec 1 jeu de 2 sangles de portage ou bretelle de portage réf. 1844.

Réf. 503012



+

Réf. 1844



ATTENTION

Chacun des 2 opérateurs doit mettre les sangles de portage

Passer vos mains comme indiqué sur la photo.



Enfiler les sangles jusqu'aux épaules pour pouvoir ensuite passer la tête à ce que la partie des sangles cousue soit positionnée dans le dos.



Passer la tête.





Ajuster les sangles pour qu'il n'y ait pas de plis sur le buste



Fixer les mousquetons sur les manilles et anneaux de levage



ATTENTION

Pour votre sécurité : Pensez à bien vous positionner lors du portage de la chaise.

Une fois accrochés, vous pouvez déplacer votre patient

