

NOTICE D'INSTALLATION DE L'APPUI-TÊTE POUR CHAISE EZ GLIDE 59ZT

L'appui tête 59T EZ Glide est prévu pour être utilisé avec les chaises de la gamme EZ Glide uniquement. L'appui-tête fournit confort et sécurité au patient. Lorsqu'il est utilisé avec la sangle de tête il aide à conserver la tête du patient dans une position adéquate lors du transport.



ATTENTION :

Une mauvaise installation et/ou utilisation de l'appui-tête peut causer des blessures. Installer et utiliser l'appui-tête comme décrit dans ce manuel.

Eloigner les doigts de la charnière lorsque vous attachez ou détachez l'appui-tête.

Composition de produit :

- 1- Appui-tête pliant
- 2- Sangle frontale rembourrée
- 3- Sac de rangement

FIXATION ET RETRAIT DE L'APPUI-TÊTE

Fixation et retrait de l'appui-tête :

- 1- Soulever la barre réglable de la chaise à la hauteur désirée.
- 2- Orienter l'appui-tête avec les panneaux en face de la chaise. Garder l'appui-tête partiellement plié et le présenter en face des montants de la barre réglable (figure 2).
- 3- Appuyer sur les panneaux de l'appui-tête jusqu'à ce qu'il soient complètement dépliés et que l'appui tête soit verrouillé sur les montants (figure 3).





Pour ajuster la position de l'appui-tête, le faire glisser sur les montants dans la direction désirée ou enlever complètement l'appui-tête et le repositionner à l'endroit souhaité.

Pour enlever l'appui-tête, faire pression sur l'arrière de l'appui-tête et plier les panneaux.

UTILISATION DE LA SANGLE FRONTALE

Pour attacher la sangle :

- 1- Centrer le coussin de la sangle sur le front du patient. Se positionner en face de la chaise. Faire passer l'extrémité de la sangle dans l'encoche de l'appui-tête la plus proche du patient, puis repasser l'extrémité de la sangle dans la seconde encoche (figure 4). Attacher la sangle en exerçant une pression sur le velcro de la boucle formée.
- 2- Tout en gardant la sangle centrée sur le front du patient, répéter la première étape afin d'attacher l'autre extrémité de la sangle (figure 5).

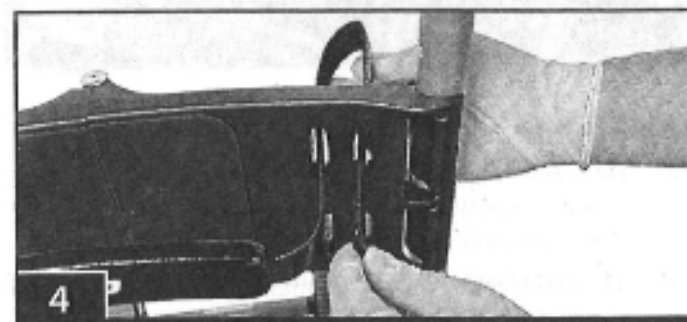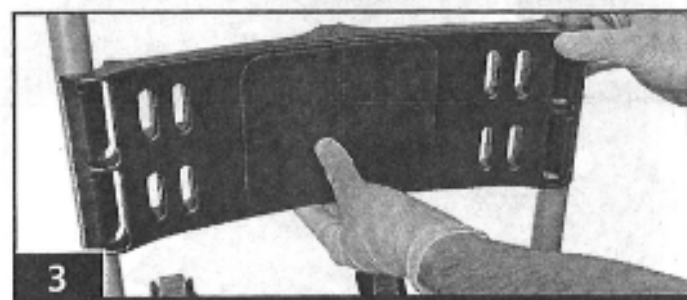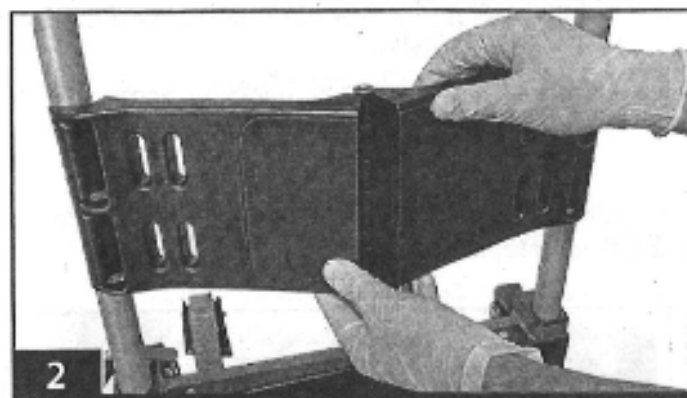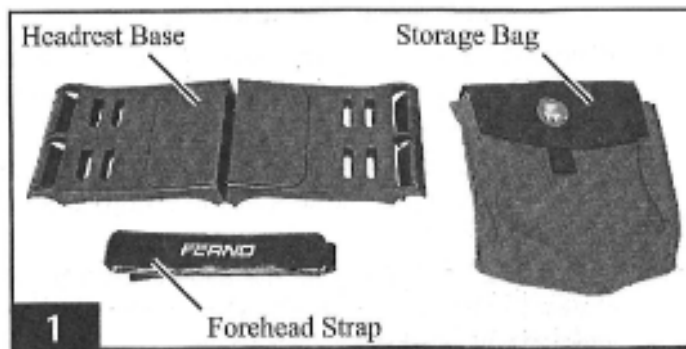

9 rue Lucien Rosengart BP 621
01506 Ambérieu en Bugey
www.dumont-securite.fr