

NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN DES ATTELLES A DEPRESSION



Vous venez d'acquérir une attelle de marque Dumont Sécurité, Ferno France, gage de qualité, et nous vous en remercions.

Ce produit s'utilise pour l'immobilisation d'un membre d'un blessé pendant son transport depuis le lieu de l'accident jusqu'à son admission en milieu spécialisé.

L'immobilisation totale d'un membre à l'aide de ce produit permet d'éviter l'aggravation des traumatismes.

L'utilisation de ce produit doit faire l'objet de précautions particulières.

Un entretien régulier est nécessaire afin d'éviter les risques de contamination.

Les consignes d'utilisation et d'entretien suivantes permettent d'utiliser ce produit de manière correcte et de lui garantir une longévité optimale.

Les attelles Dumont Sécurité, Ferno France font l'objet de contrôles à plusieurs stades de leur fabrication et sont en tous points conformes aux normes et règlements en vigueur. Elles sont testées en dépression avant leur livraison.

Elles résistent aux températures extrêmes : -30°C à +70°C

Étiquette d'identification du produit :

Chaque matelas est identifiable facilement grâce à son étiquette d'identification sur laquelle figure l'ensemble des informations relatives au produit, au fabricant, au distributeur en respect avec la réglementation européenne sur les Dispositifs Médicaux selon EU MDR 2017/745.

Cette étiquette se trouve sous une fenêtre cristal de façon à directement visible.

Mode d'emploi :

1. Choisir la taille convenable de l'attelle en fonction du membre à immobiliser.
2. Préparer l'attelle en répartissant uniformément toutes les billes et la durcir légèrement en aspirant l'air à l'aide d'une pompe à dépression.
3. Soutenir le membre blessé afin de glisser l'attelle dessous en prenant soin d'englober l'articulation sus et sous jacente.

ATTENTION : l'attelle doit être impérativement positionnée face du dessus vers le haut. Prendre soin de laisser apparaître la totalité des sangles sur les côtés et tirer les boucles à l'extrémité de ces dernières pour obtenir leur longueur maximum.

Afin d'éviter toute erreur de pause, assurez-vous que la vanne se trouve côté sol.

4. Relever les bords latéraux de l'attelle contre le membre de la victime pour former une gouttière.
5. Finir de rigidifier l'attelle. Pour la mise en dépression : s'assurer que le robinet est bien ouvert et pomper jusqu'à la dépression souhaitée ou jusqu'à ce que le vide maxi soit atteint.
6. Fermer alors le robinet et déconnecter la pompe.
7. Procéder à la fermeture de l'attelle à l'aide des sangles velcros ou attaches rapides selon le modèle. Tirer sur les extrémités des sangles pour obtenir le réglage assurant un bon maintien.

NB : Surveiller les réactions de la victime au cours de la mise en place de l'attelle.

Stockage de l'attelle :

Une dépression légère réduira son encombrement.

Nettoyage et entretien de l'attelle :

Lorsque l'attelle est souillée, la nettoyer avec de l'eau tiède savonneuse.

Ne pas utiliser de produits agressifs, alcalins, alcool, solvants, etc...

Sécher ensuite avec un chiffon doux.

Désinfectant utilisable type ANIOS (Surfanios, Aniospray,...).

Pour tout renseignement, contacter votre distributeur ou notre Service après-vente.

DUMONT SECURITE
9 rue Lucien Rosengart – BP 621
01506 AMBERIEU EN BUGEY CEDEX
Tel : 04 74 46 13 00
Fax : 04 74 38 35 22
E-mail : info@dumont-securite.fr



Garantie de 3 ans contre tout vice de fabrication.