



 Dumont
Sécurité

 **FERNO**[®]

Coffret laryngoscope fibre optique
Réf. 291038

Description du produit

Le coffret laryngoscope Besmed est un dispositif médical destiné à être utilisé pour examiner et visualiser les voies aériennes supérieures d'un patient et faciliter la mise en place d'une sonde trachéale.

Caractéristiques techniques

Matière : Polycarbonate (Poignée et lames) – Polymère (Guide lampe)

Contenu : 1 poignée moyenne, 6 lames, 1 mallette de transport

Instructions d'utilisation

1. Positionner le patient : Allongé / Hyper extension du cou (utiliser un oreiller si nécessaire).
2. Ouvrez la bouche en écartant les lèvres du patient et en tirant sur la mâchoire supérieure avec l'index.
3. Tenir le laryngoscope Besmed dans la main gauche.
4. Insérer le laryngoscope dans la bouche du patient avec la lame dirigée vers l'amygdale droite.
5. Une fois la lame insérée, déplacez la lame vers le centre en gardant la langue sur la gauche. Cela permet de voir l'épiglotte (ne la perdez jamais de vue). Avancer la lame jusqu'à ce qu'elle atteigne l'angle entre la base de la langue et l'épiglotte.
6. Soulevez la lame pour la retirer progressivement du nez vers la poitrine du patient. Ce geste permet de dégager les cordes vocales mais il peut être nécessaire qu'un assistant appuie sur la trachée pour améliorer la vision du larynx.
7. Prenez l'extrémité de la sonde trachéale dans la main droite et maintenez-la du côté droit de la bouche. Cela permet d'avoir une vue moins obstruée des cordes vocales. Gardez l'aspect concave de la sonde. Surveillez l'entrée de la sonde dans le larynx et insérez-la dans les cordes vocales jusqu'à ce que la manchette soit juste en dessous des cordes.



AVERTISSEMENT

1. Ne jamais placer une lame usagée ou souillée dans la mallette de transport. Veuillez toujours nettoyer les lames usagées avant de les ranger dans la mallette de transport.
2. Ne pas désinfecter les lames avec un produit dont le principe actif est un aldéhyde ou un phénol. Veuillez utiliser de l'alcool ou un détergent neutre.
3. Ne pas nettoyer la poignée par immersion.
4. Veuillez noter que ces instructions ne sont que des directives et que Besmed ne peut être tenu responsable des tentatives d'intubation incorrectes. L'appareil est indiqué pour être utilisé uniquement par un personnel de santé parfaitement formé aux techniques d'intubation orale.

5. Pour éviter les contaminations croisées, utilisez toujours des gants lorsque vous fixez les lames au manche.
6. Toute lame autre que celles spécifiquement conçues pour le laryngoscope Besmed ne s'adaptera pas à la poignée Besmed.
7. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant un certain temps, enlevez les piles pour le stockage.



ATTENTION

1. Lire attentivement le manuel d'utilisation avant toute utilisation.
2. Ce produit est destiné à être utilisé uniquement par du personnel qualifié.
3. Alimentation : 2 piles LR14.
4. Ce produit est destiné à un usage unique.

Stockage


Plage de température de stockage : Entre – 10°C et + 50°C

Le laryngoscope doit être stocké dans sa mallette de transport, dans un environnement propre et frais dans des conditions atmosphériques normales.

Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil. Besmed déconseille le remplacement des lampes après une période de douze mois en raison d'une éventuelle dégradation du matériel et/ou du vieillissement. Veuillez le ranger dans un endroit frais et sombre, à l'abri de la lumière directe du soleil, des températures élevées et d'une forte humidité.

Date limite d'utilisation

5 ans à partir de la date de fabrication.

 **Besmed Health Business Corp.**
No. 5, Lane 116, Wu-Kong 2nd Rd.,
Wu-Ku District, New Taipei City, Taiwan



 **0344**



Mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71, 30855 Hannover-
Langenhagen, Germany

