

Bonnes Pratiques d'utilisation


Protège Bassin de lit CareBag®

Sacs absorbants

CF procédures, Fiche produit.


Définition	<p>C'est un collecteur à usage unique pour recueillir les excréta digestifs. C'est un sac étanche muni de lien, il comporte un absorbant anti odeur.</p>
Indications Quand utiliser des sacs de recueil des excréta à usage unique munis d'absorbant ?	<p>Il évite les souillures des bassins de lit. Pour tous les patients utilisateurs de bassins notamment pour les patients :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Patients sains, - Patients infectés ou colonisés par des entérobactéries type BMR ex : entérobactérie productrice de beta lactamase à spectre étendu - Patient infecté ou porteur de BHRé : tels que les Entérocoques Résistants aux Glycopeptides, les Entérobactéries Productrices de Carbapénémases - Les cas d'infections à Clostridium difficile - Les cas de Gastro entérite aigue - Les Personnes handicapées ou démentes - Patient en traitement de cancérologie (radio nucléide dans les urines) - Pour tout patient ne pouvant aller au sanitaire : consultation, radiologie, ambulance, urgences...
Mode d'emploi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prélever un sac sur le rouleau de protège bassin de lit 2. Dérouler le 1^{er} protège-bassin et tirer en séparant le long des marques de perforation 3. Ouvrir le sac et enlever le tampon absorbant du sac, le déposer à proximité pour réinsertion 4. Positionner le sac par-dessus le bassin, puis mettre le tampon absorbant au fond du bassin 5. Laisser le patient éliminer (selles, urines) en préservant son intimité 6. Attendre quelques secondes que le contenu soit transformé en gel 7. Fermer et sceller le sac à l'aide des liens 8. Eliminer (selon le protocole de l'établissement) en DAOM ou DASRI (Cf. Procédure déchets) <p>En cas de surveillance de diurèse, peser le sac avant élimination (balance médicale disponible en prêt sur demande).</p>
Mesures de protection	<p>Lors de toute manipulation des excréta - Port du tablier et des gants à usage unique Lavage des mains si nécessaire et désinfection des mains avec un produit hydro alcoolique.</p>
Entretien du bassin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dédié au patient En l'absence de souillures visible : réaliser un essuyage humide avec un DTG DSF ou dD, puis le replacer sur son support dans la chambre. Une fois par jour et systématiquement à la fin du séjour, le passer dans le laveur désinfecteur de bassin (LDB) En cas de souillures : le porter fermé avec son couvercle jusqu'au laveur désinfecteur (LDB) 2. Non dédié au patient : le porter au laveur désinfecteur systématiquement En l'absence de laveur désinfecteur Nettoyer et désinfecter le bassin de lit avec un DTG DSF dans le local vidoir selon la procédure de l'établissement.

Mode d'emploi

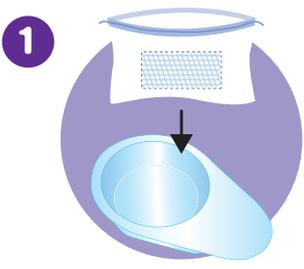

1

Placer un sac hygiénique absorbant sur le bassin.

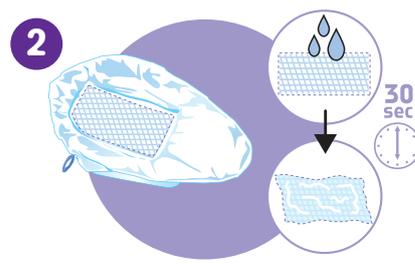

2

Le bassin est prêt à l'usage.



3

Retirer le sac avec les matières et urines solidifiées (jusqu'à 450ml), fermer, jeter à la poubelle (comme les couches et changes). NE PAS JETER DANS LES WC.



4