

MANUEL D'UTILISATION

Planche de réanimation

Réf. 970088



CE

Attention !

Ce manuel contient des instructions d'utilisation et de maintenance importantes pour ce produit. Conservez toujours ce manuel à portée de main.

Cette planche de réanimation constitue un matériel médical. Seul le personnel qualifié et dûment formé doit utiliser ce produit afin de garantir sa bonne utilisation.

Important

Lire le manuel avant utilisation. Nous ne pouvons prendre la responsabilité de tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation du produit. Il est recommandé d'être formé et entraîné à utiliser cette planche de réanimation. Les instructions suivantes ne constituent pas des recommandations médicales.

Livraison

Vérifiez le contenu immédiatement après réception. En cas d'éléments manquants, contactez votre distributeur dans les 7 jours suivant la réception. Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être acceptée. Vous trouverez dans le colis :

- 1 planche de réanimation,
- 1 manuel d'utilisation.

Garantie

Nous garantissons que le produit délivré est libre de tout défaut de fabrication selon les normes en vigueur. La durée de garantie d'un an commence à la livraison du produit chez le client ; bon de livraison et facture faisant office de preuve. La garantie couvre le remplacement ou la réparation des parties défectueuses.

Service client

Les réparations et services peuvent uniquement être réalisés par un service agréé Dönges. Contactez votre revendeur pour le service après-vente :

Dumont Sécurité

9 rue Lucien Rosengart

01506 – Ambérieu en Bugey

Tél. : +33 (0)4 74 46 13 00 / Fax : +33 (0)4 74 38 35 22

www.dumont-securite.fr / info@dumont-securite.fr

Attention !

Des réparations inappropriées et l'utilisation de pièces détachées non approuvées peuvent provoquer des blessures chez la victime et le secouriste.

Informations techniques

Matériau :	polyéthylène (PE)
Dimensions:	60 x 40 cm
Poids:	1400 g

Remarques générales sur le produit

Cette planche permet une réanimation efficace sur les surfaces souples (matelas par exemple). La surface lisse et les deux poignées de part et d'autre de la planche permettent un positionnement rapide. Grâce à la forme anatomique de la planche, la tête est idéalement placée.

Utilisation

Vérifiez avant toute utilisation que la planche de réanimation est en parfait état. Soulevez la tête du patient, le cou et les épaules, puis poussez la planche sous la tête, cou et épaules. Placez la victime doucement sur planche en plaçant la tête inclinée dans la partie incurvée. Vous pouvez débiter la réanimation.

Entretien

Lavez la planche de réanimation avec de l'eau et un détergent doux après chaque utilisation. En cas de contamination avec du sang ou des fluides corporels, désinfectez la planche de réanimation avec un désinfectant approprié pour surface.

Inspection et Maintenance

Des inspections et maintenances régulières garantissent une mise en service rapide et sécurisé. Elles sont préconisées pour une sécurité optimale de la victime et du secouriste. Vérifiez qu'il n'y a ni déformation, casse ou partie manquante. Si c'est le cas, mettre le produit hors d'usage tant qu'il n'est pas réparé.

Fabricant :

Dönges GmbH & Co. KG

Jägerwald 11

42897 Remscheid

Germany

Tél. : +49 (0) 2191 / 5626-0

Fax : +49 (0) 2191 / 5626-199

www.doenges-rs.de / info@doenges-rs.de

Distributeur :

Dumont Sécurité

9 rue Lucien Rosengart

01506 – Ambérieu en Bugey

Tél. : +33 (0)4 74 46 13 00

Fax : +33 (0)4 74 38 35 22

www.dumont-securite.fr / info@dumont-securite.fr