

Fabricant :



Rua de S. Caetano, 459 e 519 Apartado 526
4411-701 Canelas; Vila Nova de Gaia, Portugal
Telf: +351 227157100 , Fax: +351 227121144
autoribeiro@autoribeiro.com
www.autoribeiro.com



Français :

Manuel d'instructions: Harnais pédiatrique



Ref. fabricant : M051005014PRT



Harnais pédiatrique

Le harnais pédiatrique est composé d'un système de sangles qui s'adapte rapidement sur tout modèle de brancard pour le transport sécurisé des enfants. Ce produit est développé et fabriqué par Auto Ribeiro Lda.

INSTRUCTIONS



Vue arrière

- Sangles latérales pour fixation en-dessous du matelas.



Vue principale

- Complètement ajustable avec un harnais 5 points.

SPECIFICATIONS

- APoids approximatif : : 0,990 kg

CARACTERISTIQUES

- Sangles sécurisées pour le transport
- Très compact pour le stockage
- Sangles à déverrouillage rapide
- Pas de combustion lente ou d'inflammation lors du test selon l'EN 597-1:1994
- Les matériaux ne se détériorent pas avec l'usage de désinfectants.
- Le harnais pédiatrique peut être utilisé sur des enfants de 4.5 à 18 kg.

SECURITE



Ce produit peut devenir dangereux :

- Ne jamais ouvrir les sangles lors de l'utilisation.

ATTENTION : UTILISATION PAR DU PERSONNEL QUALIFIE

MAINTENANCE



- Vérifier l'état des coutures après chaque utilisation.
- Vérifier la présence de trous ou de déchirures sur les sangles après chaque utilisation.
- Vérifier la présence de trous ou de déchirures sur la bâche après chaque utilisation.

NETTOYAGE ET DESINFECTION



- Nettoyer après chaque utilisation.
- Ne pas utiliser de produits chimiques corrosifs ou abrasifs.
- Ne pas ranger l'équipement s'il n'est pas complètement sec.