



No. 500

TÊTE D'INTUBATION ADULTE

Merci d'avoir acheté notre produit.

**Recommandations:**

La tête d'intubation N°500 accepte des sondes nasales et orales jusqu'à 8 mm.

**Configuration:**

La tête d'intubation N°500 est prête à l'emploi. Aucune mise en place n'est requise.

**Lubrification:**

Utiliser uniquement des lubrifiants à base d'eau.

Un tube de lubrifiant est livré avec le mannequin.

Placer une couche de lubrifiant sur la sonde avant de l'insérer dans le mannequin.

La garantie ne fonctionnera pas en cas d'utilisation de produits à base de pétrole.

**Nettoyage:**

Le dispositif peut être nettoyé avec de l'eau légèrement savonneuse. Rincer soigneusement avec de l'eau claire et laisser sécher avant de ranger le matériel.

**Composition du produit:**

No. 500 Tête d'intubation

No. 40512 poumons et 1 estomac

No. 0363 Lubrifiant

1 sac de transport

**Garantie:**

La durée de garantie est de 3 ans contre tout défaut ou vice de fabrication à compter de la date de facture. Cette garantie ne couvre pas les mauvaises manipulations, les dommages accidentels ou intentionnels, ou n'importe quelle modification sur le produit.

**Réparation:**

La tête d'intubation doit être réparée uniquement dans nos ateliers.

**Conditions de retour:**

Si vous devez nous retourner le produit, merci de contacter notre service client afin de connaître la procédure de retour.

Ne pas retourner le produit dans un emballage qui contient des encres (journaux...).