

Bonnes Pratiques d'utilisation


Sac Vomitoire CareBag®

Sacs absorbants


CF procédures, Fiche produit.

<p>Définition</p>	<p>Le sac vomitoire CareBag® est un sac de recueil à usage unique muni d'un absorbant géifiant (450 ml organiques) anti odeur. Il sécurise le recueil, le transport et l'élimination du contenu gastrique (excréta* digestif) lors des vomissements *<i>Tout fluide biologique émis par un patient.</i></p>
<p>Indications Quand utiliser des sacs de recueil des excréta à usage unique munis d'absorbant ?</p>	<p>Pour tous les patients ayant des nausées et vomissements, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Patients sains - Patients infectés ou colonisés par des entérobactéries type BMR ex : entérobactérie productrice de beta lactamase à spectre étendu - Patient infecté ou porteur de BHRé : tels que les Entérocoques Résistants aux Glycopeptides, les Entérobactéries Productrices de Carbapénémases - Les cas d'infections à Clostridium difficile - Les cas de Gastro entérite aigue - Les patients avec traitement de chimiothérapie - Pour tout patient ne pouvant aller au sanitaire : consultation radiologie ambulance urgences...
<p>Mode d'emploi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ouvrir la boîte et prendre un sac (boite distributrice de 20 sacs) 2. Ouvrir le sac 3. Présenter le sac tout en lui expliquant comment l'utiliser... (caractère d'urgence parfois) 4. Laisser le patient vomir 5. Lui présenter un support d'essuyage à usage unique (mouchoir ou compresses humide) 6. Attendre quelques secondes que le contenu soit transformé en gel 7. Recupération du sac par le soignant 8. Fermer et sceller le sac à l'aide des liens 9. Eliminer le sac selon le protocole de l'établissement dans la filière déchets DAOM ou DASRI (Cf procédure déchets)
<p>Mesures de protection</p>	<p>Lors de toute manipulation des excréta Port du tablier et des gants à usage unique Lavage des mains si nécessaire, et désinfection des mains avec un produit hydro alcoolique</p>


Mode d'emploi

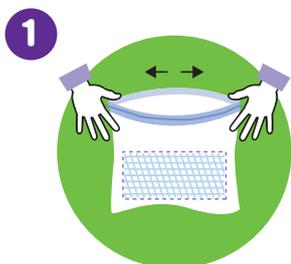

1 Ouvrir et tenir le sac hygiénique absorbant.

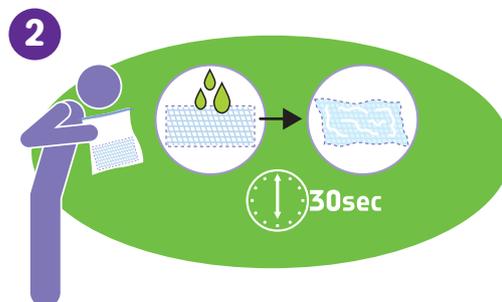

2 Vomir directement dans le sac.

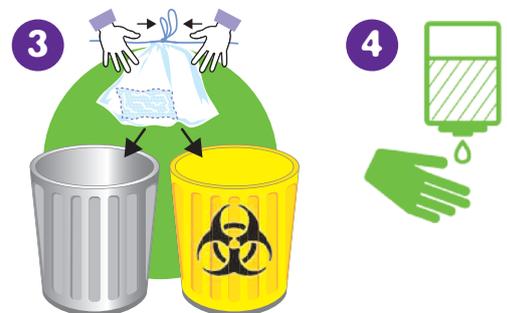

3 Fermer le sac avec les matières solidifiées (jusqu'à 450ml), éliminer dans le collecteur déchets **NE PAS JETER DANS LES WC.**