

## MANUEL D'UTILISATION

### BRANCARD PLIANT 10-8

Réf. 488800

#### **Mise en place du brancard pliant 10-8 :**

- 1 - Déplier le brancard dans le sens de la largeur puis dans le sens de la longueur.
- 2- Déplier les deux traverses sous le brancard.
- 3 - Le poser sur le sol de manière stable.
- 4 - Bien positionner le patient sur le brancard.
- 5 - Le brancard 10-8 possède deux poignées à chaque extrémité. Deux personnes minimum sont nécessaires pour transporter le patient. Quatre personnes peuvent également effectuer le transport.

#### **Rangement du brancard pliant 10-8 :**

- Plier les deux traverses au dos du brancard.
- Plier le brancard dans le sens de la longueur puis dans le sens de la largeur.

#### **Procédé de nettoyage :**

Pour nettoyer le brancard, utiliser de l'eau chaude ne dépassant pas 40°C mélangée avec du savon (ou nettoyant ordinaire). Le sécher avec un chiffon doux ou à l'air libre.

#### **Mises en garde :**

- Le brancard doit être utilisé par du personnel formé.
- Ne pas utiliser le brancard s'il est endommagé.
- Lors de la mise en place ou lors du rangement du brancard, ne pas mettre les mains sur les charnières.