



TUBULURE À OXYGÈNE 2 M

REF 278103 HS-30300

LOT







CE
2460

Matériau : Polychlorure de vinyle.

Température de stockage : 15 à 25° C.

Humidité inférieur à 85%



Mise en garde :

- Utilisation par un professionnel.
Durée de vie 3 ans.
- A usage unique
- Ranger le produit dans un environnement sec à l'abri de la chaleur et de la lumière.


Instructions d'utilisation :

A stocker loin d'une source de chaleur et de lumière

- Ce matériel doit être utilisé par des personnes habilitées ou ayant reçu une formation ou des consignes médicales adaptées.
- Pour s'assurer du bon fonctionnement de ce produit ne pas dépasser sa date de fabrication de plus de 5 ans.
- Cette tubulure doit uniquement être utilisée pour raccorder un dispositif d'oxygénothérapie au débitre.
- Ne pas relier sur un connecteur luer.
- Ne pas connecter sur un dispositif veineux ou artériel



Fabriqué par :
HSINER Co., LTD.
312, Jhongshang Rd., Shengang Dist.,
Taichung City 429, Taiwan

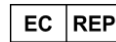

Représenté en Europe par :
Hsiner EU Rep
mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71
D-30855 Langenhagen
Germany
Tel: +49 511 39089530
Email: info@mdi-europa.com

Importé en France par :
DUMONT SECURITE
9 rue Lucien Rosengart
01506 Ambérieu-en-Bugey
Tél : 04 74 46 13 00
Fax : 04 74 38 35 22