


# Pour une utilisation par des intervenants d'urgence qualifiés et des professionnels de la santé.



**AVERTISSEMENTS :** pour usage externe uniquement. La stérilité n'est pas garantie si l'emballage est endommagé ou ouvert. Jeter le produit si l'emballage est endommagé. Eviter le contact avec les yeux. La réutilisation entraînera un risque d'infection et une perte d'efficacité.

## CONSIGNES D'UTILISATION

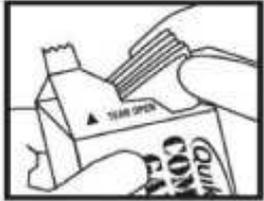

1. Ouvrez l'emballage et retirez la gaze QuickClot Gauze. Conserver l'emballage vide.



2. Placez la gaze QuickClot Gauze sur la plaie et utilisez la pour exercer une pression directe sur la source du saignement (il est possible que plusieurs gazes QuickClot Gauze soient nécessaires).



3. Continuez à exercer la pression pendant 3 minutes ou jusqu'à l'arrêt du saignement.



4. Bandez la plaie pour maintenir la pression. Faites immédiatement appel à un médecin. Montrez les consignes de retrait du produit figurant sur l'emballage au personnel médical.

# EMD

*Equipements des Métiers de la Défense*

Tél.: 02.97.05.53.74  
contact@emd-pro.com

**CE**  
**0086**

**RETRAIT DU PRODUIT :**

1. Retirez délicatement la gaze de la plaie.
2. Rincez abondamment la plaie.