

MANUEL D'UTILISATION

BRANCARD PLIANT 10-1

Réf. 4828T

Mise en place du brancard pliant 10-1 :

- 1 - Déplier le brancard dans le sens de la largeur.
- 2 - Le poser sur le sol de manière stable.
- 3 - Bien positionner le patient sur le brancard.
- 4 - Le brancard 10-1 possède deux poignées à chaque extrémité. Deux personnes minimum sont nécessaires pour transporter le patient. Quatre personnes peuvent également effectuer le transport.

Rangement du brancard pliant 10-1 :

- Plier le brancard dans le sens de la largeur.

Procédé de nettoyage :

Pour nettoyer le brancard, utiliser de l'eau chaude ne dépassant pas 40 °C mélangée avec du savon (ou nettoyant ordinaire). Le sécher avec un chiffon doux ou à l'air libre.

Mises en garde :

- Le brancard doit être utilisé par du personnel formé.
- Ne pas utiliser le brancard s'il est endommagé.
- Lors de la mise en place ou lors du rangement du brancard, ne pas mettre les mains sur les charnières.
- Ne pas utiliser de solvants ou de produits à base d'essence pour le nettoyage du brancard.