

### Important

La chaise d'escalier Janett est un dispositif médical conçu pour transporter un patient vers un brancard en vue de le transférer vers un établissement médical.

Manipuler la chaise d'escalier selon la réglementation et les protocoles du pays où elle est utilisée.

Consulter les autorités compétentes pour obtenir des renseignements sur les lois, les protocoles, et une levée de doute avant d'utiliser la chaise d'escalier avec un patient.

La **JANETT** 

### Informations techniques

#### Charge Maximale Admissible



Testée à 260 KG

#### Dimensions

Pliée (Lxlxh) :  
55,5 x 24,0 x 63,6 cm

Dépliée (Lxlxh) :  
55,5 x 71,5 x 92,1 cm

#### Poids

9,2 KG



### A. STRUCTURE DE LA CHAISE



- |   |                       |   |                        |
|---|-----------------------|---|------------------------|
| ① | Cadre du dossier      | ⑧ | Compas de verrouillage |
| ② | Toile                 | ⑨ | Repose pieds           |
| ③ | Poignées de transport | ⑩ | Roues avant            |
| ④ | Poignées arrières     | ⑪ | Roues arrières         |
| ⑤ | Accoudoirs            | ⑫ | Freins arrières        |
| ⑥ | Poignées avant        |   |                        |

### ⚠ ATTENTION

Des opérateurs non formés peuvent se blesser ou causer des blessures. Ne permettre qu'au personnel formé d'utiliser la chaise.

Une utilisation inappropriée peut causer des blessures. Utiliser la chaise seulement comme indiqué dans le présent manuel.

Un patient sans surveillance peut être blessé. Rester avec le patient durant tout le temps d'utilisation.

Un patient non attaché peut tomber de la chaise et être blessé. Utiliser des dispositifs de retenue pour sécuriser le patient sur la chaise.

Les assistants non formés peuvent causer des blessures ou être blessés. Garder la chaise sous contrôle et guider les assistants lors de la manipulation.

Un entretien inadéquat peut causer des blessures. Entretenir la chaise seulement de la façon décrite dans ce manuel

## B. DEPLIER LA CHAISE



B - 1 Tenir le cadre du dossier d'une main et le cadre de l'assise de l'autre.



B - 2 Déplier la chaise avec les deux mains jusqu'à que le crochet de verrouillage soit enclenché. Vous devez entendre un «clac» de verrouillage.




B - 3 Soulever les poignées arrières.

## C. PLIER LA CHAISE



C - 1 Baisser les poignées arrières.

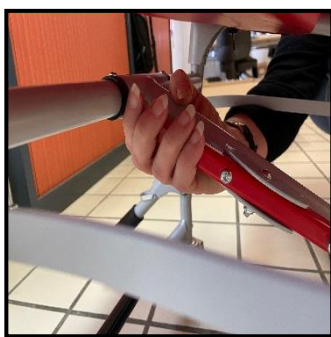

C - 2 Appuyer sur le compas de verrouillage sous l'assise de la chaise



C - 3 Plier la chaise en baissant le dossier sur l'assise.



C - 4 Transporter la chaise pliée à l'aide des poignées de transport pour la ranger dans son emplacement.

## D. INSTALLER ET SECURISER LE PATIENT SUR LA CHAISE



D - 1 Opérateur 1 : Bloquer les roues arrière à l'aide des freins et tenir fermement les poignées arrière.

Opérateur 2 : Installer le patient sur la chaise. La patient doit être bien assis au fond de la chaise : dos contre le dossier, et pieds sur le repose-pied.



D - 2 Attacher le patient avec les sangles de l'assise et du dossier.



D - 3 Déverrouiller les freins arrière et déplacer le patient au sol.



D - 3 Franchir un petit obstacle : trottoir par exemple. Poser un pied sur la barre de basculement arrière, tirer légèrement la chaise vers soi pour soulever les roues avant.

## E. PORTER LE PATIENT DANS LES ESCALIERS A L'AIDE DES POIGNEES



E - 1 Opérateur 1 : Se placer devant la chaise dans le sens de déplacement et tenir fermement les poignées avant. Opérateur 2 : Se placer derrière la chaise dans le sens du déplacement et tenir fermement les poignées arrière.



E - 2 Soulever la chaise en veillant à adopter une posture ergonomique et ne pas faire basculer le patient vers l'avant.



E - 3 Lors de la montée ou la descente des escaliers, l'opérateur à l'avant du patient doit se positionner sur les marches du bas. L'opérateur à l'arrière du patient doit se placer sur les marches du haut.



E - 4 Reposer le patient délicatement au sol en veillant à adopter une posture ergonomique et ne pas le faire basculer vers l'avant.

## F. PORTER LE PATIENT DANS LES ESCALIERS AVEC LES BRETelles DE PORTAGE



F - 1 Accrocher la première sangle aux anneaux situés sur la barre des poignées arrières. Accrocher la deuxième sangle aux anneaux situés sur les poignées avant de la chaise.



F - 2 Opérateur 1 : Positionner la sangle avant au-dessus de vos épaules et tenir les poignées avant. Opérateur 2 : Positionner la sangle arrière au-dessus de vos épaules et tenir les poignées arrières.



E - 4 Retirer les bretelles de portage avant de déplacer le patient au sol.

F - 3 Suivre les étapes E-2 à E-4 de la présentnotice.

## G. MAINTENANCE ET NETTOYAGE

G - 1 Nettoyer à l'eau chaude avec du savon doux. Rincer et sécher à l'aide d'un chiffon. Ne pas rincer la chaise avec un nettoyeur haute pression.

G - 2 Vérifier l'état de la chaise une fois par semaine et s'assurer que les vis soient bien serrées et la toile non endommagée.

G - 3 En cas de pièce défectueuse, la remplacer. Contacter le fournisseur pour toute demande de maintenance ou réparation.

**Attention** : Procéder à un contrôle visuel avant chaque utilisation

## H. PIÈCES DÉTACHÉES

H - 1 Toile  
Réf : 359365

H - 2 Poignée plastique  
Réf : 359366

H - 3 Roue avant  
Réf : 359367

H - 4 Roue arrière  
Réf : 359368

H - 5 Frein pour roue arrière  
Réf : 359369