

# NOTICE D'UTILISATION

## DU PORTOIR D'ÉVACUATION BARIARIQUE DMT SOUPLE

### RÉF : 980090

#### Présentation générale :

Portoir d'évacuation souple bariatrique avec 8 poignées renforcées pour le relevage et l'évacuation des patients ne présentant pas d'atteinte du rachis ou de polytraumatisme.

Tissus de polyester enduit de PVC P705 (serge Ferrari).

Perméable aux rayons x.

Résistance Température : - 20°C + 70°C.

Charge maximale admissible : 300 kg

Dimensions (L x l) : 213 x 116 mm

Dispositif médical de classe 1 conforme à la directive 93/42/CEE

#### Utilisation du produit :

Le portoir d'évacuation s'utilise horizontalement. Il ne constitue pas un plan dur rigide, même quand les porteurs ont soin de bien tirer sur les poignées pendant le portage et les manœuvres.

Il faut au minimum 4 opérateurs pour porter la victime.

Déplier le portoir.

Chaque opérateur se positionne à chaque coin du portoir et tient au minimum 1 poignée.

Les opérateurs se déplacent avec les bras tendus et en pas chassés.

#### Entretien :

Lorsque le portoir est souillé, le nettoyer avec de l'eau tiède savonneuse. Le sécher ensuite avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de produits agressifs : alcools, solvants...

