

Notice d'utilisation

Mannequin Obstétrique (d'accouchement)

Les caractéristiques anatomiques incluent un modèle pelvien réaliste avec le fœtus et le placenta pour permettre un entraînement pratique des multiples techniques et procédures pour de naissances en urgence. Contient des cordons ombilicaux jetables avec des pinces, une extra vulve, des matelas obstétriques d'accouchement, du sang de simulation en poudre et un sac de transport au poids très léger.

La couche superficielle de l'abdomen contient un sac de fluide avec un fœtus permanent et palpable. Le mélange liquide a besoin d'être préparé avant l'arrivée des secours juste en ajoutant de l'eau. Nous recommandons de mettre quatre litres d'eau dans l'abdomen par la valve sur le dessous. Cette eau doit être mélangée avec la substance poudreuse dans le sac pour simuler le toucher de l'abdomen.

Le sac d'insufflation en vinyle est incorporé pour être placé en dessous de l'abdomen, qui est gonflé à l'aide de la pompe à air pour donner la forme souhaitée à celui-ci. Pour gonfler, mettre le sac avec les vis en métal sur le côté supérieur de la cavité, et attacher l'abdomen sur le mannequin. Attacher le tube à la fin du bulbe d'insufflation à la valve située sur le sac et commencer à gonfler à l'aide de la pompe à air. Quand la forme désirée est atteinte, la valve du sac doit être fermée et la pompe enlevée pour éviter les fuites d'air. Ceci doit donner une apparence réelle à l'abdomen.

Le sang en poudre et le méthyle cellulose sont inclus pour produire des fluides qui peuvent passer dans le cordon ombilical. Les instructions sont incluses pour le mélange.

Si on choisit de ne pas utiliser les fluides pour la simulation de l'accouchement, une poudre est incorporée pour poudrer l'intérieur de la filière pelvigénitale, ainsi que l'extérieur du fœtus.

Il est recommandé de ne pas utiliser le sang artificiel en conjonction avec la couche superficielle de l'abdomen pour prévenir la coloration du revêtement en nylon de la vessie interne qui contient le fœtus et le liquide amniotique simulé.

Le mannequin dispose de cordons ombilicaux à usage unique (qui peuvent être attachés et coupés), de pinces à cordon, et une couleur réaliste du placenta. Un nouveau-né est inclus avec un bouton pression auquel le cordon ombilical peut être attaché au nouveau-né d'une part et au placenta de l'autre.

Pour remplir le fœtus avec de l'air :

1. glisser le tuyau de l'insufflation d'air du bulbe sur la valve métallique située sous le pied du nouveau-né.
2. tourner pour ouvrir.
3. pomper jusqu'à obtenir la forme souhaitée.
4. visser la valve.
5. retirer l'assemblage.

Nettoyage et maintenance :

1. toutes les parties doivent être nettoyées avec de l'eau chaude et du savon doux.
2. nettoyer les réservoirs, le nouveau-né et l'intérieur de la filière pelvienne après chaque utilisation.
3. le sang de simulation peut être enlevé du revêtement par un bon blanchissage, mais peut laisser des taches permanentes.

Composants :

- 180 : mannequin d'accouchement de type caucasien avec sac de transport léger
- 181 : bassin (rigide)
- 182 : vulve obstétrique (anatomie correcte)
- 183 : matelas obstétrique transparent
- 184 : matelas obstétrique d'accouchement (avec fœtus installé en permanence)
- 171 : matelas obstétrique opaque
- 185 : placenta
- 186 : sac de transport pour le mannequin obstétrique
- 159 : cordons ombilicaux (une douzaine)
- 154 : tapis Polyback (5)
- 162 : méthyle cellulose
- 173 : fœtus (nouveau-né)
- 172 : fœtus (prématuré)
- 167 : pinces pour cordon ombilical
- 225 : sang en poudre (pour faire un gallon)
- 187 : sac d'insufflation d'air

Garantie limitée :

Simulaid, Inc. garantie à l'acheteur que le mannequin est exempt de défauts matériels et de fabrication pour une période de trois ans à partir de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas la mauvaise utilisation, l'usure, la déchirure, l'abus ou les dégâts accidentels causés sur le mannequin, ainsi que le gonflage excessif.

Votre distributeur :

Dumont Sécurité
142, avenue de la libération
01506 Ambérieu en Bugey

Tél. : 04 74 46 13 00
Fax : 04 74 38 35 22

www.dumont-securite.fr