



SF2454IMPLANT: IFU

Old version (it will be used until out of stock)

MODE D'EMPLOI: Casser la bulle à l'intérieur du sachet en pressant avec force des deux mains. Ensuite agiter le sachet pour mélanger le contenu. Appliquer sur la partie intéressée.

INDICATIONS: Hématomes, entorses, traumatismes, hyperthermie, et en tous les cas où la cryothérapie est nécessaire.

ATTENTION: Produit uniservice destiné exclusivement à usage externe. Ne pas casser la confection ou ne pas provoquer la sortie du contenu. Tenir le sachet hors de portée des enfants. Le contenu tache et est nuisible si ingéré. Si cela arrivait accidentellement consulter immédiatement un médecin. Stocker à température ambiante. Tenir loin des sources de chaleur et des substances inflammables. Ne pas appliquer sur la peau endommagée. Avant d'utiliser le sachet sur les bébés, les enfants ou les personnes âgées ou en cas de diabète ou maladie cardiovasculaire et/ou insensibilité de la peau (syndrome de Raynaud) il est impératif de consulter le médecin. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin. En cas de doute sur le traitement à utiliser, consulter votre médecin ou votre pharmacien.

CONTENU: Mixture des sels azotés (conforme au règlement CE 1907/2006 m.s.i.) et eau.

New version

POCHE DE FROID À USAGE UNIQUE - MODE D'EMPLOI: Casser la bulle à l'intérieur du sachet en pressant avec force des deux mains. Ensuite agiter le sachet pour mélanger le contenu. Appliquer sur la partie intéressée.

INDICATIONS: Hématomes, entorses, traumatismes, hyperthermie, et en tous les cas où la cryothérapie est nécessaire.

ATTENTION: pour usage externe seulement, à usage unique. Ne pas utiliser si el sachet est endommagée. Ne pas percer le sachet et ne pas provoquer la sortie du contenu. Le contenu tache, irrite (en cas de contact, rincer à l'eau la zone concernée pendant 15 min.), est nocif (en cas d'ingestion, recourir immédiatement à une intervention médicale). Conserver à température ambiante hors de portée des enfants, loin des sources de chaleur et des matériaux inflammables. Ne pas congeler, ne pas appliquer sur une peau irritée. Consulter son médecin en cas de maladies cardiovasculaires, circulatoires, de diabète et/ou d'insensibilité cutanée (syndrome de Raynaud), d'utilisation sur nourrissons, enfants et personnes âgées, en cas de doute sur le traitement à effectuer et si la symptomatologie persiste.

CONTENU: urée, chlorure d'ammonium et eau.