

B. Braun Space

Pompe volumétrique Infusomat®Space



Ce document n'est pas la notice d'utilisation, mais une aide à l'utilisation simplifiée.

Avant la mise en service de l'Infusomat®Space, toute personne utilisant cet appareil doit consulter la notice d'utilisation Infusomat®Space et accessoires

1 – Allumer l'appareil :

- Sélectionner 
- Allumage de l'appareil et vérification interne du système

2 – Insérer la tubulure :

- Sélectionner  pour ouvrir le clavier
- Tirer sur le clavier afin d'accéder à l'emplacement de la tubulure
- Insérer la tubulure comme ci-après. Engager le clamp tubulure dans son logement jusqu'à ce que le levier d'ouverture se verrouille
- Refermer le clavier en faisant une pression sur la partie supérieure et médiane du clavier
- Sélectionner  pour confirmer le modèle de tubulure



3 – Programmer le volume à perfuser (VAP), le débit et démarrer la perfusion :

- Si la fonction purge est activée, sélectionner  pour purger le prolongateur ou  pour annuler. Sélectionner  pour arrêter la purge. Sélectionner  ou  pour continuer
- Le menu est affiché à l'écran et l'item VAP est sélectionné
- Sélectionner  pour programmer le VAP
- Sélectionner  et  pour le réglage des valeurs et  et  pour passer d'un digit à l'autre
- Confirmer avec  pour passer à la programmation du débit. Suivre la même procédure
- Démarrer la perfusion avec  ou effacer la valeur de débit avec 

4 – Délivrer un bolus :

- Sélectionner  sur le clavier
- Sélectionner  pour démarrer un bolus manuel à la valeur de débit bolus programmée (voir menu Option pour modifier le débit Bolus si nécessaire)

5 – Remplacer la tubulure :

- Sélectionner la touche  pour arrêter la perfusion
- Sélectionner . Confirmer le message à l'écran avec la touche 
- Ouverture partielle du clavier. Tirer vers vous le clavier pour accéder à la tubulure et abaisser le levier vert jusqu'à ce qu'il se verrouille. Retirer la tubulure et insérer la nouvelle

6 – Éteindre l'appareil :

- Après avoir retiré la tubulure (Point 5), refermer le clavier
- Sélectionner  pendant 3 secondes

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Distribué par : B. Braun Medical
Division Hospital Care
204, Avenue du Maréchal Juin - BP 331
F-92107 Boulogne Cedex
Tél. 01 41 10 53 00
Fax 01 41 10 53 99
www.bbraun.fr

Fabriqué par : B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Str.1
34212 Melsungen
Tél +49 (0) 56 61 71-0

B. Braun Space

Pousse-seringue Perfusor®Space

⚠ Ce document n'est pas la notice d'utilisation, mais une aide à l'utilisation simplifiée.

Avant la mise en service du Perfusor®Space, toute personne utilisant cet appareil doit consulter la notice d'utilisation Perfusor®Space et accessoires.

1 – Allumer l'appareil :

- Sélectionner 
- Allumage de l'appareil et vérification interne du système suivis de l'ouverture automatique du bras mécanisé

2 – Insérer une seringue :

- Tirer le verrou de seringue vers vous puis sur la droite
- Ouvrir le clavier et insérer la seringue comme ci-après
- Refermer le verrou de seringue en maintenant la seringue de la main gauche
- Refermer le clavier
- Le pousse-seringue reconnaît le modèle de seringue inséré*.

Confirmer avec la touche 

- Le bras du pousse-seringue se referme automatiquement



3 – Programmer un débit et démarrer la perfusion :

- Si la fonction purge est activée, sélectionner  pour purger le prolongateur ou  pour annuler. Sélectionner  pour arrêter la purge. Sélectionner  ou  pour continuer
- Le débit est affiché à l'écran, dans le menu principal
- Sélectionner  pour programmer un débit
- Sélectionner  et  pour le réglage des valeurs et  et  pour passer d'un digit à l'autre
- Démarrer la perfusion avec  ou effacer la valeur de débit avec 

4 – Délivrer un bolus :

- Sélectionner  sur le clavier
- Sélectionner  pour délivrer un bolus manuel à la valeur du débit bolus programmée.
(Voir menu Option pour modifier le débit Bolus si nécessaire)

5 – Remplacer la seringue :

- Sélectionner la touche  pour arrêter la perfusion
- Tirer le verrou de seringue vers vous puis sur la droite
- Confirmer le message à l'écran avec la touche . Ouverture automatique du bras
- Ouvrir le clavier et remplacer la seringue

6 – Éteindre l'appareil :

- Après avoir retiré la seringue (Voir point 5), refermer le verrou puis le clavier
- Sélectionner  pendant 3 secondes